

# INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: Pinças

NOME COMERCIAL: Pinça Artroscópica Canulada Estéril TRAUMEC

## PRODUTO DE USO MÉDICO PRODUTO ESTÉRIL

**ATENÇÃO:** *Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação destes pontos poderá levar à ocorrência de complicações.*

### 1. Identificação do Produto

A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é um produto para saúde utilizado em intervenção e apoio cirúrgico e embora deva ser utilizada em cirurgia artroscópica de qualquer articulação, a sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.


- A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é fornecida estéril por Radiação Gama (CO 60).
- A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é de uso único.
- A PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TRAUMEC é fornecida montada, pronto para uso. Produto estéril, devendo ser descartado após sua utilização.

### 2. Materiais Utilizados na Fabricação

As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC são fabricadas em aços inoxidáveis AISI 420, martensítico, temperável de acordo com a norma ABNT NBR ISO 7153-1.

### 3. Apresentação

A tabela abaixo (tabela 1) traz a relação de produtos pertencentes à família de PINÇAS ARTROSCÓPICAS CANULADAS ESTÉREIS TRAUMEC.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ILUSTRAÇÃO
PA.02.15.0008	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR001M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0009	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR002M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0010	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR003M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0011	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR004M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0012	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR005M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0013	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR006M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	
PA.02.15.0014	Pinça Artroscópica Canulada Estéril TR007M	Segurar, coletar e suturar tecidos e fragmentos.	Aço Inoxidável AISI 420 (NBR 13911)	



#### 4. Princípio de Funcionamento / Modo de Uso

As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC possuem a função de executar tarefas diversas no campo cirúrgico com precisão e segurança, para segurar, coletar, suturar, inserir, extrair, afastar, selecionar, soltar, furar e agarrar; tanto os tecidos e seus fragmentos, como outros instrumentos.

#### 5. Condições de Armazenamento

As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

#### 6. Condições de Transporte e Manuseio

As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características.

Devem ser manipuladas cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

**Observação: Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.**

#### 7. Indicações

As Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC executam tarefas diversas no campo cirúrgico com precisão e segurança, para segurar, coletar, suturar, inserir, extrair, afastar, selecionar, soltar, furar e agarrar; tanto os tecidos e seus fragmentos, como outros instrumentos.

#### 8. Contra Indicações

Não se Aplica.

#### 9. Advertências

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada. O fabricante recomenda uso único.
- Não utilizar se houver sinais de danos.
- Antes de utilizar as pinças leia atentamente as instruções de uso.
- Não se devem reutilizar as Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis, pois as mesmas são de uso único.
- Após o uso das Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC, elas deverão ser descartadas.

#### 10. Precauções

- Antes de utilizar as pinças, leia atentamente as instruções de uso



- Não se deve reutilizar as Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis, pois os mesmos são de uso único
- Após o uso das Pinças Artroscópicas Canuladas Estéreis TRAUMEC, elas deverão ser descartadas.

## 11. Modelo de Rotulagem

Nome Técnico: Pinças

Descrição: PINÇA ARTROSCÓPICA CANULADA ESTÉRIL TR001M

Nome Comercial: Pinça Artroscópica Canulada Estéril TRAUMEC

Código: PA.02.15.0008

Lote: XXXXXX

Quantidade: 01 PÇ

Esterilizado por: Raio Gama (CO-60) Data de Fabricação: DD/MM/AAAA

Prazo de Validade: DD/MM/AAAA

Registro ANVISA n.º: 80455630054

Matéria-prima: XXXXXXXXXXXX

Responsável Técnico: Osmar Teixeira Neto - CRQSP - 04162524

### **PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REUTILIZAR PRODUTO ESTÉRIL – PROIBIDO REPROCESSAR**

VERIFIQUE A REVISÃO DA INSTRUÇÃO DISPONÍVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM)

AS INSTRUÇÕES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO [SAC@TRAUMEC.COM.BR](mailto:SAC@TRAUMEC.COM.BR) OU FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL

Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta sob temperatura +15°C a + 45°C - umidade relativa 75% máxima

“VER INSTRUÇÃO DE USO”

Instrução de Uso nº 80455630054 – Rev.01 disponível no website: [www.traumec.com.br](http://www.traumec.com.br)  
TRAUMEC – TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.123.223/0001-10

RUA 1A JC, Nº138 – Jardim Centenário

CEP 13503-510 - Rio Claro/SP

